



# Expert Médical

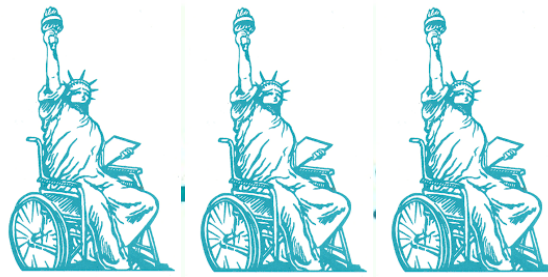

## CONSEILS ENTRETIEN MASQUES

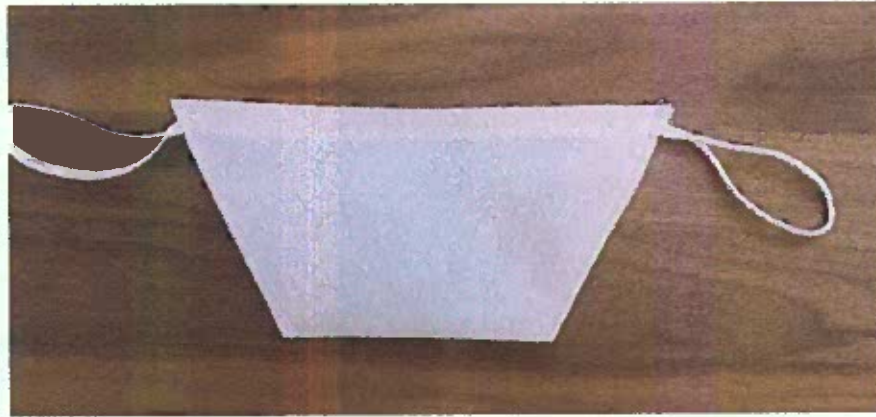

### NETTOYAGE ET SECHAGE

- Contrôle entretien réalisé  
5 cycles de lavages 60° pendant 30 minutes  
**Selon les recommandations AFNOR**

Il est recommandé que le masque barrière résiste à 5 cycles de lavage au minimum.  
Le cycle complet de lavage ( mouillage, lavage, rinçage ) doit être de 30 minutes ( blanchis-  
serie ou autres ) avec une température de lavage de 60°C et des produits professionnels.

Il convient d'éviter tout contact entre un masque barrière souillé ( à laver ) et des articles  
vestimentaires propres.

La personne chargée du lavage devra se protéger pour manipuler les masques souillés s'ils  
ne sont pas dans un sac hydrosoluble.